


38.5°C

WÄRMEDECKE FÜR VET1/VET1.5

Wärmedecke zum Auflegen mit variablem Kopf/Hals-Ausschnitt, besonders geeignet für zahnmedizinische Eingriffe
Größe (LxB) 150x95cm *Art.-Nr. 2VT010*

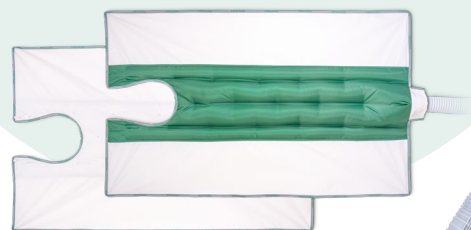

VERBINDUNGSSCHLAUCH

Verbindet die Wärmedecke, Art.-Nr. 2VT010, mit einer Wärmeunterlage | Größe (LxB) 80x8cm
Art.-Nr. 2VT011



WARMLUFTSCHLAUCH

Zur Verwendung in der postoperativen Phase
Größe (LxB) 150x20cm
Art.-Nr. 2VT006



SCHUTZDECKEN FÜR WÄRMEUNTERLAGEN

Schützt Ihre Wärmeunterlage vor Verschmutzung
Größe (LxB) 150x95cm
Art.-Nr. 2VT008
Größe (LxB) 75x95cm
Art.-Nr. 2VT009



KLETT KABELBINDER

Halten den Schlauch Ihres Warmluftgerätes fest im Schlauchanschluss Ihrer Wärmeunterlage
Größe (LxB) 26/35x2,5cm
Art.-Nr. 4KV0004 – grün
Art.-Nr. 4KV0005 – weiß




MOECK VETERINARY

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Effizientes Wärmemanagement
- + Aktive Temperaturregelung
- + Konvektive Wärme von unten
- + Intraoperative Auftrocknung
- + Wärme an allen Auflagepunkten
- + Freies Operationsfeld
- + Mit fast allen Warmluftgeräten kombinierbar
- + Druckentlastung
- + Wiederverwendbar
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Durchlässig für Röntgenstrahlen
- + Adsorptionsfähig



Biesel GmbH Intelligente TherapieSysteme
Nahestraße 9 · 65597 Hünfelden · Germany

Tel. +49(0)6438 3815 · Fax +49(0)6438 4255
Mobil +41(0)172 7682740
info@bieselgmbh.de

BIESELGMBH.COM
MOECKKUNDMOECKSHOP.DE


TIERE MENSCHLICH WARM VERSORGT




MOECK VETERINARY

EIN UMFASSENDES UND MODERNES TEMPERATURMANAGEMENTSYSTEM

Das MOECK WARMING SYSTEM® gibt Ihnen ein effektives, nachhaltiges und flexibles Werkzeug zur optimalen Temperierung von Klein- und mittelgroßen Tieren an die Hand. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, den Arbeitsalltag in medizinischen Einrichtungen durch eine qualitätsorientierte Patientenversorgung bestmöglich zu unterstützen.

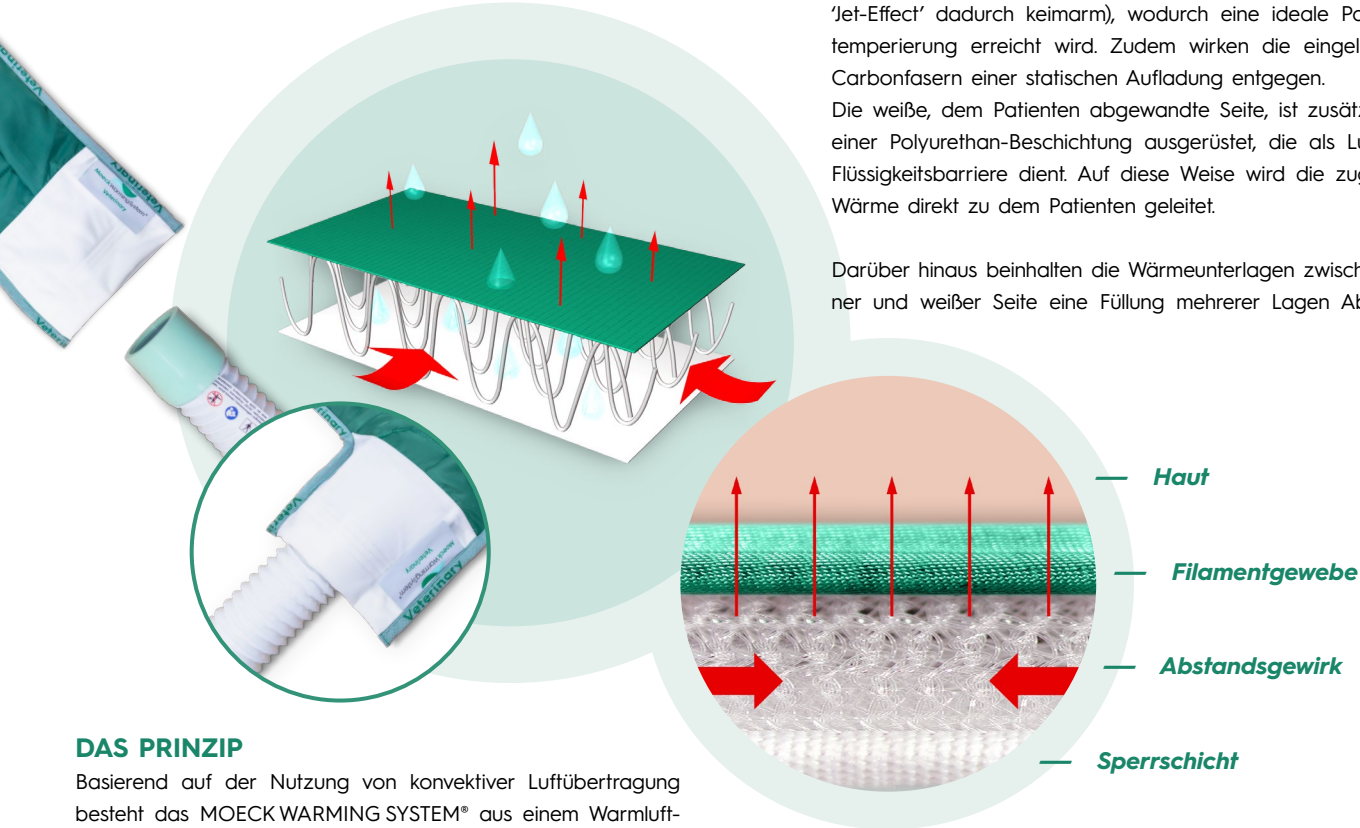

DAS PRINZIP

Basierend auf der Nutzung von konvektiver Luftübertragung besteht das MOECK WARMING SYSTEM® aus einem Warmluftgerät und verschiedenen Modellen von wiederaufbereiten textilen Unterlagen. Dabei wird die vom Warmluftgerät temperierte Luft über ein bis zwei flexible Schläuche in das Innere des jeweils angeschlossenen textilen Produktes geleitet. Durch die sorgfältig ausgewählten Materialien der textilen Produkte verteilt sich die zugeführte Luft gleichmäßig und flächig unter dem Patienten, so dass dieser entsprechend der gewünschten Einstellung am Warmluftgerät effektiv temperiert wird.

DAS MOECK WARMING SYSTEM® IM DETAIL

Die textilen Produkte des MOECK WARMING SYSTEM® setzen sich aus 3 sorgfältig ausgewählten technischen Textilien zusammen, die jeweils bestimmte Funktionen erfüllen und in Kombination ein optimal aufeinander abgestimmtes System bilden.

So besteht die grüne, dem Patienten zugewandte Seite, aus einem feinporigen Filamentgewebe. Die damit gegebene Luftdurchlässigkeit führt zu einem gleichmäßigen Luftstrom (kein 'Jet-Effect' dadurch keimarm), wodurch eine ideale Patiententemperierung erreicht wird. Zudem wirken die eingelassenen Carbonfasern einer statischen Aufladung entgegen.

Die weiße, dem Patienten abgewandte Seite, ist zusätzlich mit einer Polyurethan-Beschichtung ausgerüstet, die als Luft- und Flüssigkeitsbarriere dient. Auf diese Weise wird die zugeführte Wärme direkt zu dem Patienten geleitet.

Darüber hinaus beinhalten die Wärmeunterlagen zwischen grüner und weißer Seite eine Füllung mehrerer Lagen Abstandsgewirk.

Diese Zwischenschicht passt sich elastisch an Körperform und Gewicht des Patienten an und führt dadurch zu einer Druckentlastung und einem verbesserten Liegekomfort. Zudem verfügt das Abstandsgewirk aufgrund seines dreidimensionalen Aufbaus und der grobporigen Struktur über eine hocheffiziente Feuchte-Leitfunktion, die dazu beiträgt, dass Feuchte nach unten abgeführt wird.

VET1 – MITTELGROSSE TIERE

Konzipiert für Hunde, Schweine, Schafe etc.
Größe (L×B) 115×65cm | Gewicht ca. 1.200g
Art.-Nr. 2VT001



VET1.5 – KLEINE UND MITTELGROSSE TIERE

Konzipiert für Hunde und Katzen
Größe (L×B) 100×55cm | Gewicht ca. 830g
Art.-Nr. 2VT015



VET2 – KLEINTIERE

Ideal für kleine Hunde, Katzen, Kaninchen etc.
Größe (L×B) 55×65cm | Gewicht ca. 450g
Art.-Nr. 2VT002



IOB – WARMLUFTGERÄT

Temperatureinstellung zwischen Raumluft, 32°C, 38°C und 43°C
Zwei wählbare Lüfterstufen
Größe (L×B×H) 22×22×28cm
Gewicht ca. 5,4kg
Art.-Nr. 12IB01DE



TWINWARM BB – WARMLUFTGERÄT MIT 2 SCHLÄUCHEN

Gradgenaue Temperatureinstellung zwischen 28°C und 43°C | Fünf individuell wählbare Lüfterstufen
Größe (L×B×H) 46×46×37cm
Gewicht ca. 12,6kg
Art.-Nr. 12BB01(DE)

