

Produktname	Größe*	Gewicht	Material	Art.-Nr.	Produktabbildung
VET 1	115×65 cm (L×B)	ca. 1.200 g	98% PES / 2% PU	2VT001	
VET 1.5	100×55 cm (L×B)	ca. 830 g	98% PES / 2% PU	2VT015	
VET 2	55×65 cm (L×B)	ca. 450 g	98% PES / 2% PU	2VT002	


*Die textilen Produkte laufen während der ersten Aufbereitungszyklen um 3–5% ein. Ferner wird bei den Maßangaben ein Toleranzwert von ±2 cm zugrunde gelegt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wiederverwendbare konvektive Wärmeunterlage zur Patiententemperierung von unten

ANWENDUNG

- ▶ Wärmeunterlage mit der **weißen Seite** auf dem OP-Tisch platzieren – **Abb. 1**
- ▶ Schlauchende des Warmluftgerätes in eine der Anschlussöffnungen der Wärmeunterlage 10 cm hinter den Klettverschluss schieben und den Schlauch mit dem Klettverschluss fixieren – **Abb. 2**
- ▶ Warmluftgerät gemäß Gebrauchsanweisung anschalten und betreiben – **Abb. 3**
- ▶ **HINWEIS:** Nur Warmluftgeräte verwenden, die für die konvektive Patientenwärmung zugelassen sind
- ▶ Patient auf der **grünen Seite** (= Patientenseite) der Wärmeunterlage positionieren – **Abb. 4**
- ▶ **TIPP:** Beste Ergebnisse werden in Kombination mit unserem Warmluftgerät **TWINWARM BB** erzielt

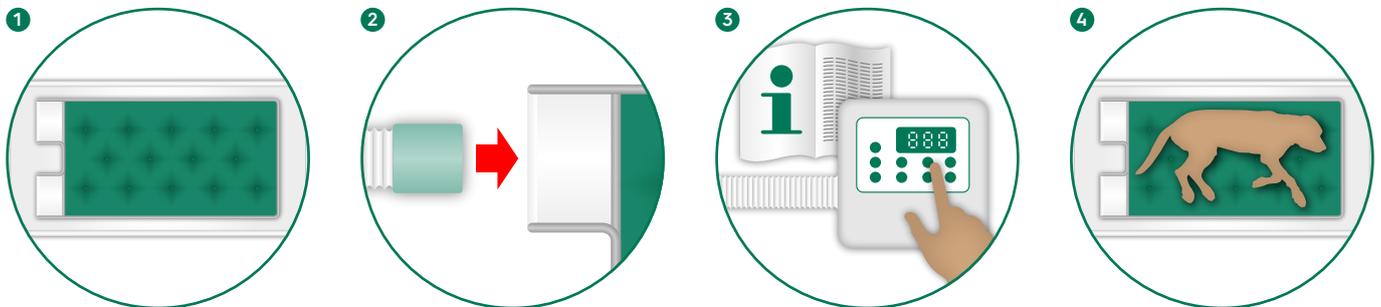

ACHTUNG

Um einen gleichmäßigen Warmluftfluss zu gewährleisten und eine thermische Schädigung zu vermeiden, dürfen keine Folien o. Ä. zwischen Patient und Wärmeunterlage appliziert werden. Die Wärmeunterlage darf nur für veterinäre Patienten verwendet werden.

TEXTILPFLEGE

- ▶ **WASCHEN:** Beim Befüllen der Waschmaschine darauf achten, dass die Wärmeunterlage mit der grünen Seite nach außen gefaltet wird
- ▶ Bitte die Trommel der Waschmaschine nur bis zur Hälfte füllen
- ▶ Die Wärmeunterlage sollte nur im Schonwaschgang bei 60° – jedoch nicht mehr als 70° – gewaschen werden
- ▶ Auf eine niedrige Schleudernzahl von 600 bis 800 Umdrehungen achten
- ▶ **TROCKNEN:** Die Wärmeunterlage ist im Wäschetrockner trockenbar
- ▶ **HYGIENE:** Vollwaschmittel mit Desinfektionsanteil
- ▶ **TIPP:** Wir empfehlen die Verwendung eines Wäschenetzes



Max. 70 °C Pflegeleicht



Trockner geeignet




Nicht bügeln



Sauerstoffbleichen



Schonende Trockenreinigung

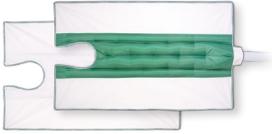Produktname	Größe*	Gewicht	Material	Art.-Nr.	Produktabbildung
WÄRMEDECKE VET 1 / VET 1.5	150×95 cm (L×B)	ca. 370 g	98% PES / 2% PU	2VT010	
VERBINDUNGS- SCHLAUCH	80×8 cm (L×B)	ca. 400 g	Silikon (Efrosil 200/60 grün) / Spezial PVC / Zellkautschuk	2VT011	

*Die textilen Produkte laufen während der ersten Aufbereitungszyklen um 3–5% ein. Ferner wird bei den Maßangaben ein Toleranzwert von ±2 cm zugrunde gelegt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wiederverwendbare konvektive Wärmedecke mit variablem Kopf/Hals-Ausschnitt zur Patiententemperierung in der Veterinärmedizin. Speziell geeignet für zahnmedizinische Eingriffe.

ANWENDUNG

- ▶ Wärmeunterlage gemäß Gebrauchsanweisung vorbereiten und den Patienten darauf platzieren – **Abb. 1**
- ▶ Wärmedecke mit der **grünen Seite** auf den Patienten legen, so dass dieser komplett abgedeckt ist – **Abb. 2**
- ▶ Schlauchenden des Verbindungsschlauches etwa 10 cm in die Anschlussöffnung der Wärmedecke wie Wärmeunterlage hinter den Klettverschluss schieben und mit diesem fixieren – **Abb. 3 + 4**
- ▶ Variablen Rundhals-Ausschnitt entsprechend der Kopfgröße des Patienten zuknöpfen
- ▶ Überstehende Seitenteile werden unter die Wärmeunterlage geklappt – **Abb. 5**



ACHTUNG

Um einen gleichmäßigen Warmluftfluss zu gewährleisten und eine thermische Schädigung zu vermeiden, dürfen keine Folien o. Ä. zwischen Patient und Wärmeunterlage appliziert werden. Die Wärmeunterlage darf nur für veterinäre Patienten verwendet werden.

TEXTILPFLEGE

- ▶ **WASCHEN:** Beim Befüllen der Waschmaschine darauf achten, dass die Wärmedecke mit der grünen Seite nach außen gefaltet wird
- ▶ Bitte die Trommel der Waschmaschine nur bis zur Hälfte füllen
- ▶ Die Wärmedecke sollte nur im Schonwaschgang bei 60° – jedoch nicht mehr als 70° – gewaschen werden
- ▶ Auf eine niedrige Schleudernzahl von 600 bis 800 Umdrehungen achten
- ▶ **TROCKNEN:** Die Wärmedecke ist im Wäschetrockner trockenbar
- ▶ **HYGIENE:** Vollwaschmittel mit Desinfektionsanteil
- ▶ **TIPP:** Wir empfehlen die Verwendung eines Wäschenetzes



Max. 70 °C Pflegeleicht



Trockner geeignet



Nicht bügeln



Sauerstoffbleichen



Schonende Trockenreinigung